

## Kurzprogrammier-Anweisung DSW

<b>1</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">P</div>	Programmstart " PR NR " erscheint
<b>2</b>	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">1</div> bis <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">30</div>	Mit Zehnerblock Programmnummer wählen
<b>3</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">ENTER</div>	" Set p " erscheint
<b>4</b>	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">A</div> bis <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">F</div>	Pumpe wählen " P-X " erscheint
<b>5</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">XX</div>	Flüssigkeitsmenge in ml mit Zehnerblock eingeben
<b>6</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">ENTER</div>	" Pr-X " erscheint
<b>7</b>	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">ENTER</div> oder <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">1.XX</div>	Dichte eingeben oder mit " <i>ENTER</i> " Dichte 1 bestätigen
<b>8</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">ENTER</div>	" Set P " erscheint
<b>9</b>	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">ENTER</div> oder <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">zu 4</div>	Programm abspeichern mit " ENTER " oder zum Punkt 4 zurückkehren, um die nächste Pumpe zu programmieren

## Programmstart-Anweisung

<b>1</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">START</div>	Programmwahl " PR NR " erscheint
<b>2</b>	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">1</div> bis <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 5px;">30</div>	Mit Zehnerblock Programmnummer wählen
<b>3</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto;">ENTER</div>	Programm bestätigen